


Bischoff & Bischoff


Bedienungsanleitung

**Rollator B/
Rollator B XL**



Enjoy mobility.

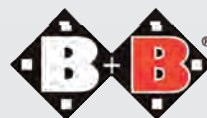

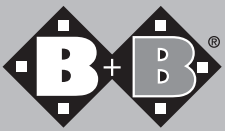

Rollator B / B XL (Gehilfe)

Sehr geehrter Kunde,

mit dem Erwerb dieser B+B Gehilfe verfügen Sie über ein deutsches Spitzenprodukt, das sich schon tausendfach im professionellen Einsatz bewährt hat.

Die Ihnen vorliegende Bedienungsanleitung soll Sie mit der Bedienung und Handhabung Ihrer B+B Gehilfe besser vertraut und somit sicherer machen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und mehr Mobilität mit unserem Produkt!

Indikation / Kontraindikation

Der Rollator unterstützt bewegungseingeschränkte Benutzer beim Gehen z.B. im häuslichen Bereich, beim Einkaufen oder spazieren im Freien.

Der Sitzbereich ermöglicht bei längeren Wegstrecken oder Pausen auszu-ruhen.

Der Rollator darf nur auf ebenem und festem Untergrund genutzt werden.

Das Produkt darf nicht als Aufstieghilfe oder Transportmittel fürschwere Lasten benutzt werden.






- Handgriff
- Bremse mit Feststeller
- Griffrohr
- Tablett
- Griffrohrfeststellung
- Arretierhaken
- Utensilienkorb
- Stockhalter
- Lenkrad
- Laufрад

Sicherheitshinweise

- Max. Belastbarkeit Rollator B 120 kg, Rollator B XL 200 kg!
- Fahren nur auf ebenem und horizontalem Untergrund!
- Mindesteinstecktiefe der Griffrohre (Markierung) beachten!
- Die Schiebegriffe dürfen max. 45° nach außen gedreht werden. Es besteht ansonsten eine erhöhte Kippgefahr zur Seite!
- Jede Bremse wirkt nur auf ein Laufрад!
- Zur Reinigung keine aggressiven oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden!
- Bremsen vom Fachhändler alle 6 Monate überprüfen lassen!

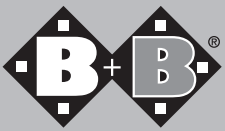

Entfalten

Positionieren Sie den B+B Rollator in Fahrtrichtung vor sich.

- Betätigen Sie die Feststellbremse.
- Kippen Sie den B+B Rollator zu sich, bis die Lenkräder entlastet sind und drücken Sie gleichzeitig mit einem leichten Ruck die Handgriffe nach unten.
- Um den Klappmechanismus zu arretieren, drücken Sie mit der flachen Hand die Querstrebe bis das Auto-lock System (Arretierung) selbstständig eingerastet ist.

Falten

- Wiederholen Sie die ersten beiden Schritte.
- Zur Entriegelung halten Sie den Betätigungshebel des Auto-lock Systems nach vorne gedrückt, und folgen den nächsten Punkten.
- Halten Sie mit einer Hand den Rollator am Handgriff.
- Ergreifen Sie nun die Querstrebe und ziehen diese einfach nach oben. Achten Sie darauf, dass bei den Faltvorgängen weder Körperteile noch Kleidungsstücke eingeklemmt werden.

Utensilienkorb anbauen


- Der B+B Rollator ist entfaltet. Betätigen Sie die Feststellbremse.
- Positionieren Sie sich entgegen der Fahrtrichtung vor dem B+B Rollator.
- Hängen Sie den Utensilienkorb einfach in die an den vorderen Rahmenrohren angebrachten Haken ein.
- Zum Abnehmen des Korbs, einfach den Tragebügel in die Hand nehmen und nach oben abnehmen.

Tablett anbauen

- Der B+B Rollator ist entfaltet. Betätigen Sie die Feststellbremse.
- Positionieren Sie sich entgegen der Fahrtrichtung vor dem B+B Rollator.
- Legen Sie das Tablett von oben so auf das Sitzpolster, dass sich die vier Kunststoffzapfen des Tablett in die Löcher des Sitzpolsters einfügen.

Schiebegriffe einstellen

- Der B+B Rollator ist entfaltet.
- Betätigen Sie die Feststellbremse.
- Öffnen Sie die Kunststoffschrauben an den Griffrohren bis sich die Handgriffe frei bewegen lassen.
- Positionieren Sie sich hinter dem B+B Rollator und lassen Sie Ihre Arme locker nach unten hängen.
- Stellen Sie nun die Schiebegriffe so ein, dass sie sich in Höhe Ihrer Handgelenke befinden.
- Ziehen Sie nach dem Einstellvorgang die Klemmhebel wieder fest an. Beachten Sie die Mindesteinstecktiefe (geriffelter Bereich) der Griffrohre.
- Die Schiebegriffe dürfen max. 45° nach außen gedreht werden! Siehe auch Sicherheitshinweise.

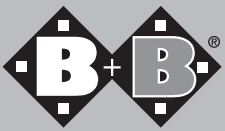

Bremsbetätigung- und einstellung

Betriebsbremse

Die Betriebsbremse wird mit den beiden Handbremshebeln an den Schiebegriffen durch Ziehen nach oben betätigt.

Feststellbremse

- Drücken Sie zum Arretieren die beiden Bremshebel nach unten.
- Zum Lösen ziehen Sie die beiden Bremshebel zurück in die Mittelstellung.

Bremseinstellung

Die Bremsen können direkt am Bremshebel eingestellt werden. Die Bremse ist richtig eingestellt, wenn der Bremshebel oder die Bremsbacken ohne Betätigung des Bremshebels, das Laufrad nicht berühren.

- Um die Bremse härter einzustellen, ist die Rändelschraube an den Bremsvorrichtungen aufzudrehen und die Rändelmutter entgegengesetzt zu kontern.
- Bei der Verstellung am Bowdenzug ist zunächst die Kontermutter (M6) zu lösen.
- Danach wird die Gewindehülse soweit aufgedreht, bis die richtige Einstellung gefunden ist. Damit sich die Einstellung nicht verändert, muss die Gewindehülse wieder mit der Mutter (M6) gekontert werden.
- Um die Bremse weicher einzustellen, ist in bezeichneten Ablauf umgekehrt zu verfahren.

Räder und Bereifung

Ihr Rollator ist mit PU-Rädern der Größe 200 x 50 mm ausgerüstet.

Technische Daten

Typ:	Rollator B	Rollator B XL
Farbe:	Silbermetallic	Silbermetallic
Länge:	68 cm	64 cm
Breite:	61 cm	71 cm
Sitzhöhe:	61 cm	63 cm
Gefaltet:	24 cm	24 cm
Gewicht:	10,1 kg	12,9 kg

- Inklusive Stockhalter, Korb und Tablett.
- Anatomisch geformte Handgriffe.
- Kombinierte Betriebs- und Feststellbremse.
- Stabile Stahlkonstruktion, korrosionsfeste Beschichtung.
- Verdrehsichere Griffrohre, stufenlos von 78-94 cm einstellbar.
- PU-Bereifung 200 x 50 mm.

Garantie-Abschnitt

(Achten Sie auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen)

Typ: B+B Rollator B

B+B Rollator B XL

Seriennummer:*

(vom Fachhandel einzutragen)

Fachhändler:

Datum und Stempel

Bischoff & Bischoff GmbH

Becker-Göring-Straße 13 • D-76307 Karlsbad

Tel.: +49 7248/ 9209-2 • Fax: +49 7248/ 9209-3

www.bischoff-bischoff.com

info@bischoff-bischoff.de